

Tisztelt Páciensünk!

Kérjük, hogy a mintavétel előtt figyelmesen olvassa el a mintavételi eljárást az eredményes és szakszerű mintavétel érdekében. Mintavételi csomagunk tartalmazza a mintavételhez szükséges összes eszközt.

A SIKERES MINTAVÉTEL ÉRDEKÉBEN A MINTAVÉTELT MEGELŐZŐ ÓRÁKBAN ÜGYELJEN A MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ FOLYADÉKBEVITELRE! AZ EREDMÉNYT AZ ÉTKEZÉS NEM BEFOLYÁSOLJA.

MINTAVÉTELI CSOMAG TARTALMA:

- 2 oldalas mintavételi eljárás tájékoztató
- alkoholos fertőtlenítő kendő
- 2 db ujjbegyszűrő lándzsa
- 2 db mintavételi eszköz (egy tartaléknak)
- ragtapasz
- simítózáras tasak
- párnadoboz
- mintakérőlap
- térítésmentesen feladható válaszborték
- térítésmentes feladáshoz könyvelt küldemény feladóvevénye



MINTAVÉTELI TARTÁLY

Mintavétel előtt a tartály aljáról húzza le a zárókupakot, a mintavétel befejeztével ezzel kell majd lezárni a kis flakont.


KAPILLÁRIS CSŐ →




← ZÁRÓKUPAK

MINTAVÉTELI LÁNDZSA


A lándzsa egyszer használatos, steril és kapilláris mintavételre alkalmas, mely a kupak levétele után az ujjbegyre ható nyomás útján aktiválódik. Biztonsági funkcióval ellátott a tűszúrásos balesetek elkerülése érdekében.

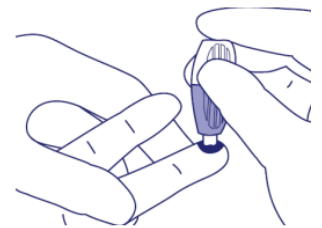


A MINTAVÉTEL MENETE

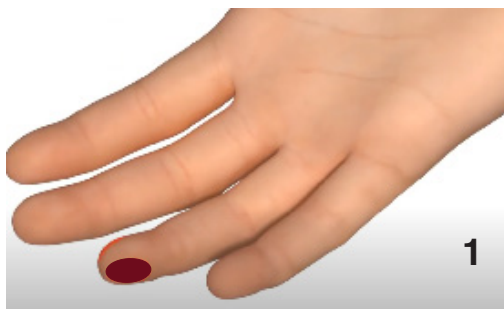


Mintavételre a gyűrűsujjak két oldala a legalkalmasabb.

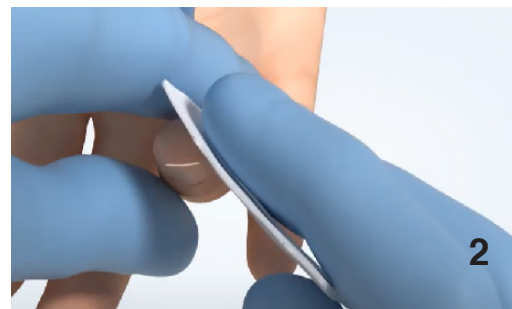

Mosson alaposan kezet lehetőleg meleg vízzel, hogy a kapilláris erek kitáguljanak. A fertőtlenítő kendővel törölje le a jelzett területet. Várja meg, amíg a fertőtlenítőszer elpárolog.

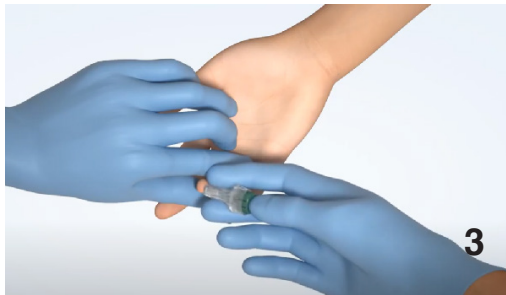

Masszírozó mozdulatokkal préselje a vért az ujjbegy felé, majd a lándzsát egy erős határozott mozdulattal nyomja az ujjbegyre. A szúrást követően a lándzsát vegye el az ujjról.

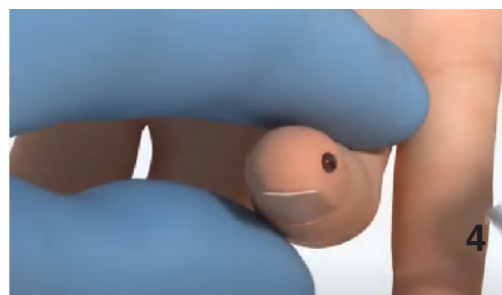

Az első csepp vért törölje le.




Biztosítsa az ujj stabilitását, miközben préseli a vért az ujjbegy irányába. A mintavevő kapillárist kb. 45°-ban érintse a csepphez, hogy a csepp a kapillárisba átfolyhasson. Közben figyeljen rá, hogy ne jusson levegő a kapillárisba.



Engedje a vért újratöltődni az ujjbegy felületén addig, amíg a kapilláris cső teljesen megtelik. Ragassza le a sebet a ragtapasszal.

A mintavételi csövet a biztos eredmény érdekében a jelölésig kell megtölteni.

Ezután a mintavevőt fordítsa függőleges helyzetbe, hogy a csőből a tartályba folyhasson a minta. Távolítsa el a kiürült kapilláris csövet a hozzátartozó kupak elforgatásával és zárja le a tartályt a korábban levett zárókupakkal. A tartályt óvatosan forgassa meg legalább ötször, hatszor, de NE RÁZZA!

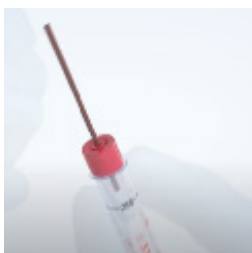

A minta 24 órán belül átadható a magán vérvételi pontjainkon nyitvatartási időben, vagy a csomagban található borítékba helyezve, szintén 24 órán belül postai úton juttatható el a laboratóriumba.

A postai feladás előtt kérjük, ügyeljen az alábbiakra:

- A mintavételi eszközre írja rá a nevét és tegye az önzáródó tasakba
- A tasakot tegye a párnadobozba
- A kérelapot pontosan, olvashatóan, nagybetűkkel töltse ki
- Fentieket tegye a megcímezett válaszbörítékbe

A borítékot és a hozzá kitöltött ajánlott szelvényt a postán díjmentesen átveszik.

MINTÁT KIZÁRÓLAG A MINTA ÉS AZ OLVASHATÓAN KITÖLTÖTT KÉRŐLAP EGYÜTTES MEGLÉTE ESETÉN TUDUNK FELDOLGOZNI.

További hasznos információért keresse fel weboldalunkat, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

CORDEN International /Magyarország/ Kft.

www.corden.hu

+36 1 800 9313; +36 30 416 9982